




RESTAURAÇÕES INDIRETAS

Maxcem Elite™

Cimento de Resina Universal

Um cimento para cobrir todas as necessidades*

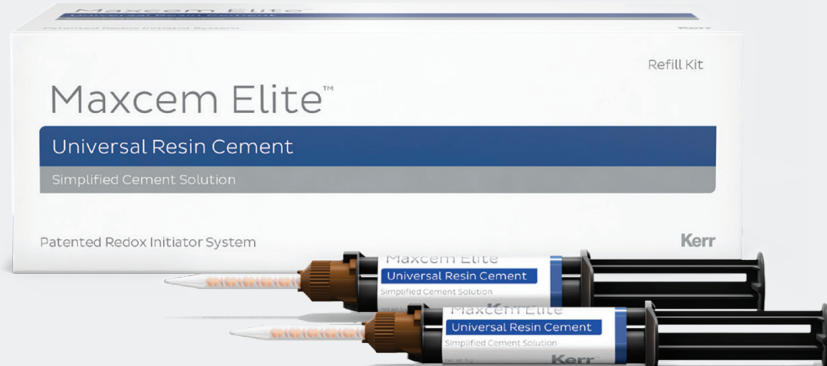

Um cimento
para todas as
necessidades*



Compatibilidade
universal




Aumento
da força
de adesão**



Inteligente
e simples

Técnica de cimentação de facetas dentárias com Maxcem Elite e Optibond Universal

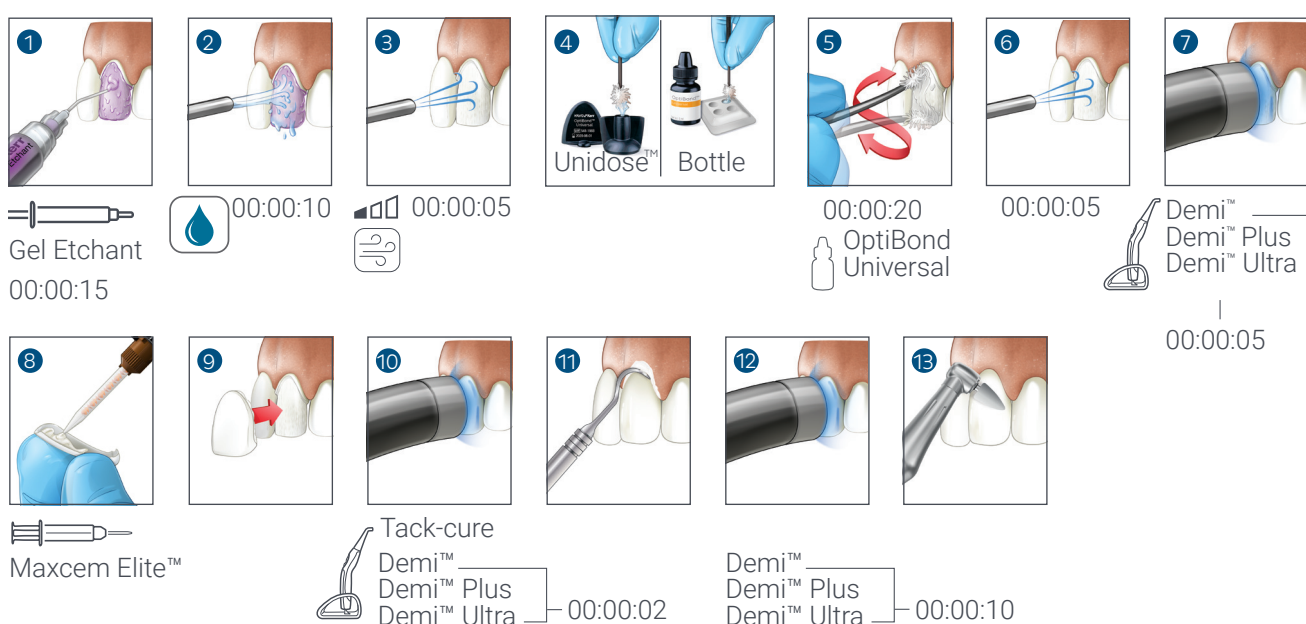

*Para todas as restaurações indiretas (inlay, onlay, facetas, coroas [incluindo restaurações de coroa para pilares de implantes] ponte, pino, compósito anterior ou posterior, cerâmica, metalocerâmica, restauração metálica e restaurações CAD/CAM).

**Para restaurações que exigem ainda mais resistência, combine Maxcem Elite Universal com OptiBond Universal.

Técnica de cimentação para restaurações indirectas (excluindo facetas) com Maxcem Elite Universal e Optibond Universal

I. Preparação do restauro

Dissilicato de lítio/porcelana 30 PSI




Metal/Zirconia 60 PSI
Compósito 15 PSI




II. Preparação do Adesivo* Unidoses

Unidose™

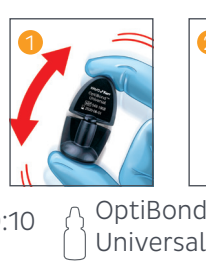


*Opcional

Botella

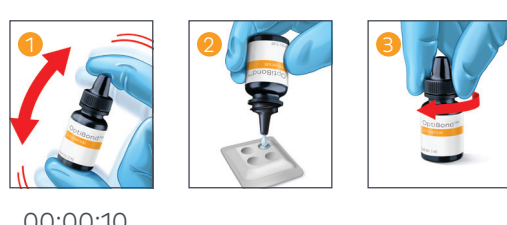


IIIa. Aplicação do Adesivo*

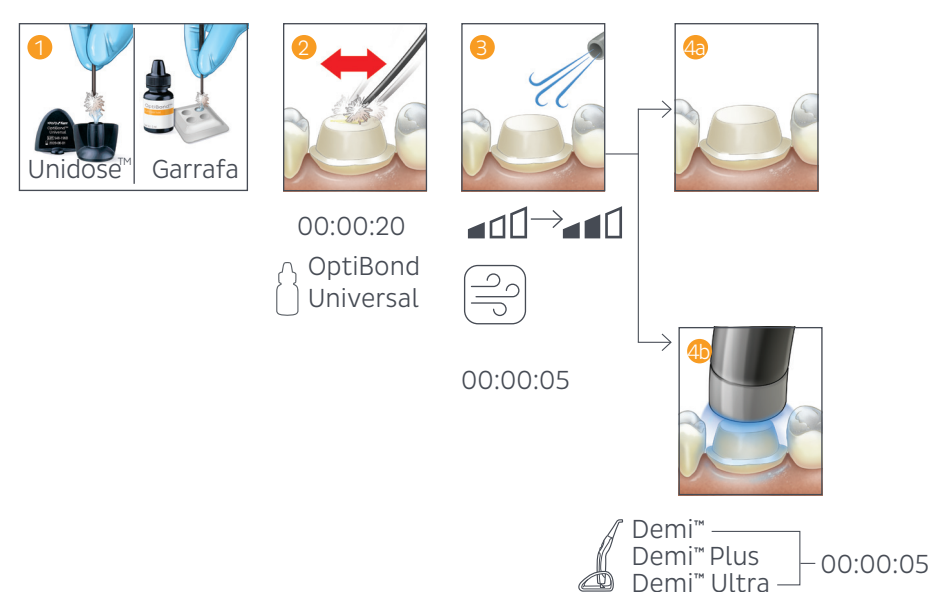

*Opcional

IIIb. Procedimento de cimentação para restauração indireta (exceto facetas)

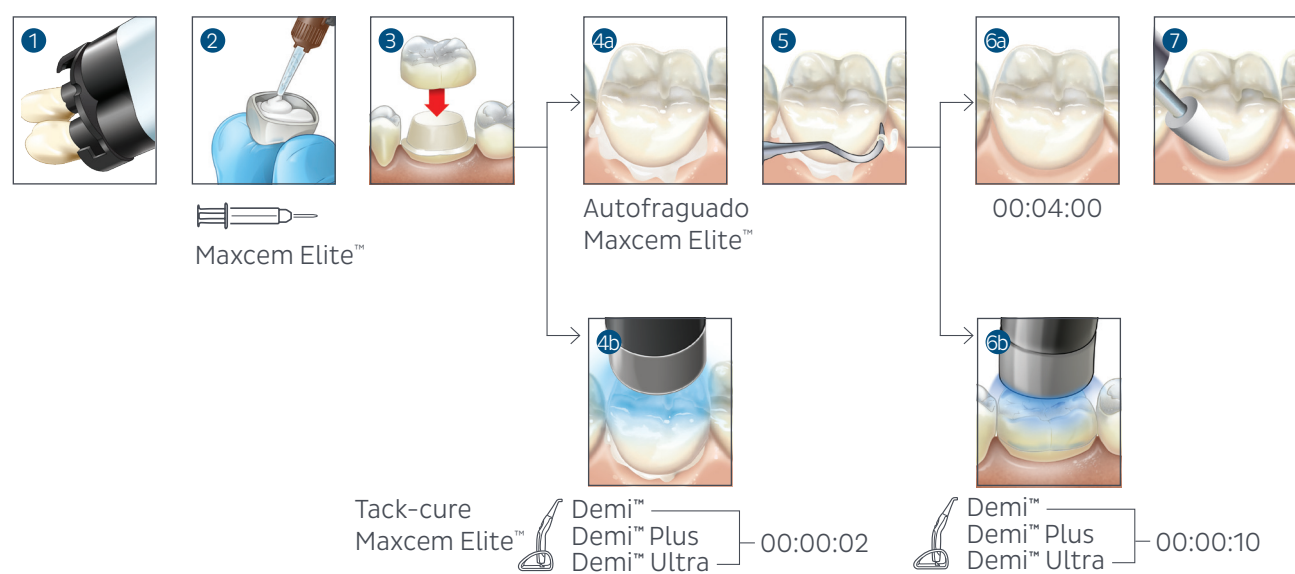

Não perca esta oportunidade

Maxcem Elite



2 seringas de 5g + 16 pontas

COMPRE JÁ

Optibond Universal



1 frasco de 5ml

COMPRE JÁ